

Návod k použití



1. Pro vaši bezpečnost

1.1 Pro vaši bezpečnost

- Přečtěte si tento dokument pozorně a celý.
- Dodržujte pokyny a bezpečnostní upozornění uvedená v tomto dokumentu i na výrobku.
- Používejte výrobek pouze v technicky bezvadném stavu a s vědomím bezpečnostních rizik.
- Tento dokument uschovejte pro budoucí použití a předejte jej při předání výrobku dalšímu uživateli.

1.2 Použití v souladu s určením

Výrobek je určen výhradně pro soukromé použití.

- Používejte výrobek výhradně jako chodítko nebo dočasně jako sedátko.
- Používejte pouze originální díly dodané výrobcem nebo jím schválené náhradní díly.
- Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Jakékoli jiné použití je považováno za použití v rozporu s určením a může způsobit zranění nebo materiální škody.

Při nedodržení bezpečnostních pokynů nepřebírá výrobce odpovědnost za vzniklé škody.

1.3 Použití v rozporu s určením

Výrobek není určen pro komerční použití.

- Nepoužívejte jako hračku, ani k lezení či podobným účelům.
- Nepřekračujte maximální celkové zatížení.
- Nezavěšujte těžké předměty na výrobek.
- Nepoužívejte výrobek s vadnými díly.
- Montáž, demontáž, údržbu ani čištění nesmí provádět děti.
- Rolátor nesmí být používán jako náhrada invalidního vozíku.

1.4 Cílová skupina

Uživatelé jsou dospělí a mladiství od 14 let pod dohledem.

Osoby s omezenými fyzickými či mentálními schopnostmi smějí výrobek používat pouze pod dohledem.

Použití rolátoru musí být předem konzultováno s lékařem.

Odborný personál jsou osoby s mechanickým nebo medicínským vzděláním (např. řemeslníci, kovovýroba apod.).

Výstražná upozornění

VAROVÁNÍ – Nebezpečí, které může při nedodržení vést ke smrti nebo těžkému zranění.

UPOZORNĚNÍ – Nebezpečí, které může vést ke zranění.

POZOR – Nebezpečí, které může způsobit materiální škody.

2. Popis a funkce

Tento výrobek je rolátor určený jako chodítko pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Může být také dočasně používán jako sedátko.

Rolátor je vybaven odnímatelnou nákupní taškou o objemu 13 litrů. Výškově nastavitelné rukojeti a velká pojezdová kola zajišťují komfort při pohybu.

Označení dílů

1. Opěrka zad
2. Parkovací brzda
3. Sedátko
4. Výškově nastavitelná rukojeť
5. Nákupní taška
6. Brzdová páka
7. Pojezdové kolo



3. Vybalení a kontrola


3.1 Vybalení

VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení obalovým materiálem.

- Obal ihned zlikvidujte.
- Uchovávejte malé části mimo dosah dětí.

Postup:

1. Odstraňte pásky nebo použijte nůžky.
2. Postavte karton šipkami nahoru.
3. Otevřete karton.
4. Vyjměte všechny díly.
5. Položte je na měkký, rovný povrch.
6. Zkontrolujte úplnost dodávky.

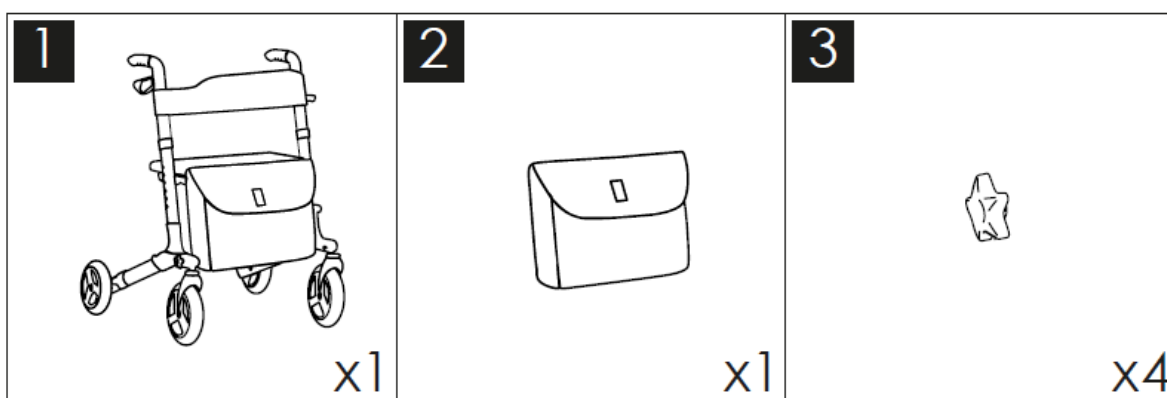

3.2 Kontrola dodávky

Nepoužívejte výrobek s chybějícími nebo vadnými díly.

4. Sestavení

UPOZORNĚNÍ – Nebezpečí zranění.

Výrobek kompletně a bezpečně sestavte.


4.1 Rozložení

Postupujte dle montážního návodu.


4.2 Složení

Postupujte opačně dle montážního návodu.

- Otevřete sedací desku a zatlačte ji oběma rukama dolů

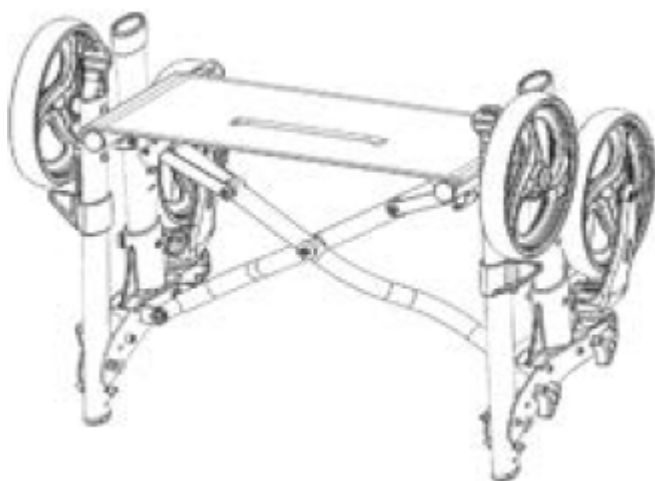


- Namontujte přední kolo. Šroub zcela utáhněte.

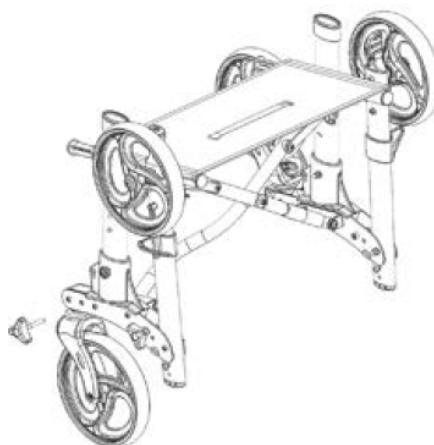


- Namontujte zadní kolo. Šroub zcela utáhněte.




- Namontujte rukojeti. Zasuňte tyče obou rukojetí současně do odpovídajících trubek, dokud koule úplně nevyskočí. Dbejte na to, aby výška nastavení zůstala stejná.

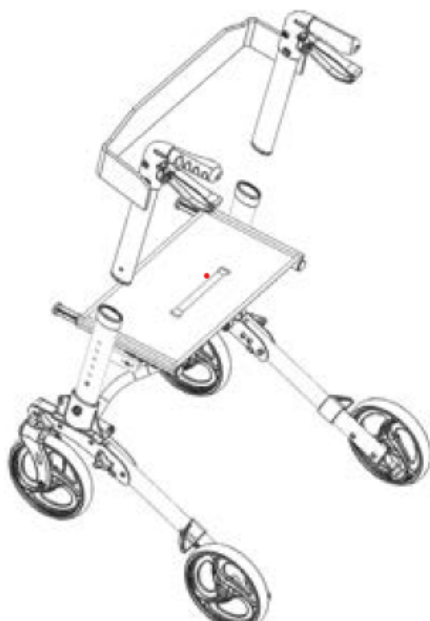

- Namontujte držák hole.

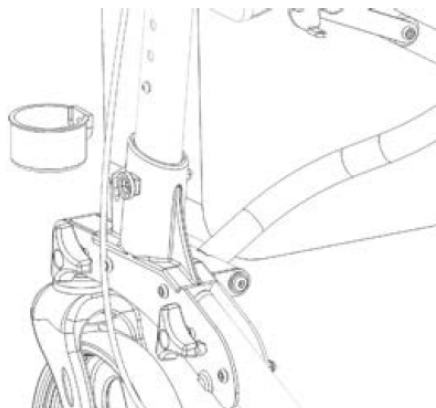

- Připevněte tašku

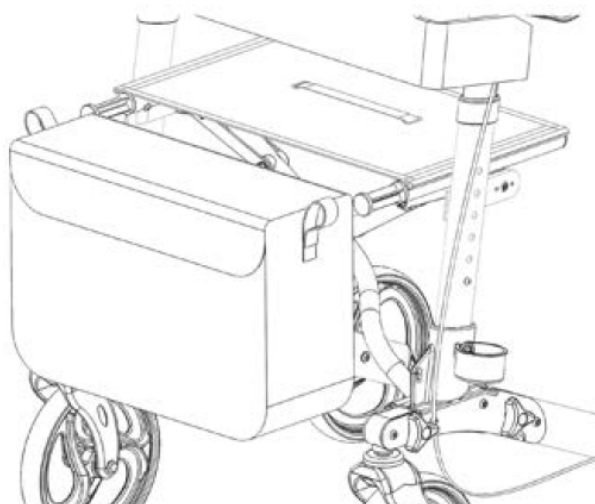

4.3 Nastavení výšky rukojeti

Přizpůsobte výšku rukojeti své tělesné výšce.

Ideální výška je, pokud jsou rukojeti ve stejné výšce jako zápěstí při vzpřímeném postoji.

1. Stiskněte tlačítko aretace.
2. Nastavte výšku.
3. Nechte tlačítko zapadnout.
4. Opakujte na druhé straně.

Obě rukojeti musí být ve stejné výšce.



5. Přeprava

Přepravujte výrobek pouze složený a zajištěný.

6. Používání

UPOZORNĚNÍ – Nebezpečí pádu při nesprávném použití.


- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
 - Nenechávejte děti bez dozoru.
 - Pohybujte se krokovou rychlostí.
 - Nepřepravujte osoby ani zvířata.
 - Nepoužívejte na svazích, schodech ani nerovném terénu.
 - Nepoužívejte na mokřím, zledovatělém nebo sypkém povrchu.
 - Vyhýbejte se překážkám.
 - Dodržujte maximální nosnost.
-

6.1 Nácvik chůze s chodítkem

- Procvičujte s doprovodem druhé osoby.
 - Udržujte vzpřímené držení těla.
 - Ved'te rolátor blízko těla.
 - Dělejte malé a opatrné kroky.
-

6.2 Použití brzd

Každá rukojeť má brzdovou páku.

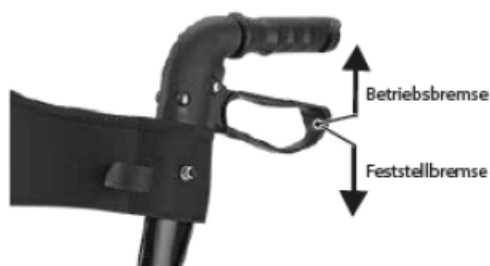

- Zatáhnutím nahoru brzdíte.
- Stisknutím dolů aktivujete parkovací brzdu.
- Uvolnění provedete tahem nahoru.

Brzdy používejte pouze v klidovém stavu.

8. Údržba a čištění

- Odstraňujte prach vlhkým hadříkem.
 - Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
 - Pravidelně kontrolujte šrouby a spoje.
 - Poškozené díly ihned vyměňte.
-

9. Opravy

Opravy smí provádět pouze výrobce nebo odborník.
Používejte pouze originální náhradní díly.

10. Demontáž

Demontáž provádějte opačně než montáž.
Nepoužívejte elektrické nářadí.